



**Последовательность проведения ЛАКТОТЕСТ:**

1. До начала проведения теста пациент находится в спокойном состоянии в положении сидя.
2. **Этикетка самоклеющаяся:**
  - Подписать дату и ФИО (на каждой этикетке);
  - Промаркировать все пакеты.
3. **Лист регистрации дыхательных проб и симптомов:**
  - Заполнить ФИО, возраст, данные анамнеза (наличие нарушений опорожнения кишечника, сахарный диабет).
  - После взятия каждой пробы заполнить данные о наличии симптомов (урчание в животе, вздутие, диарея, боли в животе, тошнота, изжога, отрыжка, слабость, головокружение, головная боль, ощущение холода или тепла, покалывание в конечностях, парестезии, зуд, чувство беспокойства или «нет» при отсутствии симптомов).

Выбирайте пакет согласно порядковому номеру диагностической пробы (указанному на этикетке).

**Диагностические пробы: №1 - 0 минут      №2 - 0 минут (дубликат)**

Пакеты – 2 шт.



Трубка – 1 шт.

(используется для взятия всех проб выдыхаемого воздуха)

1. Открыть крышку пакета против часовой стрелки и утилизировать.
2. Вставить трубку для взятия проб до дна пакета, предварительно расправив его дно.
3. Не делая глубокого вдоха, задержать дыхание на 5-10 секунд.
4. Выдохнуть первую часть воздуха в окружающую среду.
5. Через трубку в пакет медленно выдохнуть весь воздух до конца, максимально наполнив пакет.
6. **Герметично закрыть пакет пробкой до упора.**



7. **Сразу после получения** пробы №1 провести взятие пробы №2.

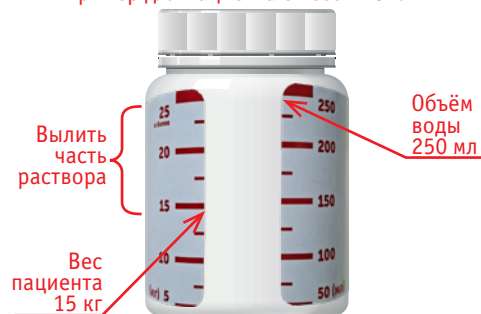
Если взятие пробы воздуха не получилось, можно извлечь весь воздух сдавливанием пакета и повторить взятие пробы в тот же пакет в течение 2-3 минут.

**Внимание:** Техника сбора воздуха единая для всех проб.



- Открыть флакон «ЛАКТОТЕСТ» вращая крышку против часовой стрелки, сохраняя вертикальное положение.
- Заполнить флакон теплой питьевой водой в количестве 250 мл. (см. метку на шкале этикетки **справа**).
- Выдержать до полного растворения препарата.
- **Пациенту с весом более 25 кг:** выпить весь раствор.
- **Пациенту с весом менее 25 кг:** вылить из флакона часть готового раствора **до метки, соответствующей весу пациента** (см. метку на шкале этикетки **слева**). Выпить оставшуюся часть раствора.

Пример для пациента с весом 15 кг

**Диагностические пробы: №3 - 15 минут      №4 - 30 минут      №5 - 60 минут  
№6 - 90 минут      №7 - 120 минут      №8 - 120 минут (дубликат)**

Пакеты – 6 шт.

- После приема раствора «ЛАКТОТЕСТ» осуществить взятие **ещё шести проб** выдыхаемого воздуха **через 15, 30, 60, 90, 120 минут и сразу 120 минут (дубликат).**

**Передать медсестре герметично** закрытые пакеты с пробами воздуха (8 шт.).