

Наименование направляющего учреждения*

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента*

Имя пациента*

Отчество пациента*

Пол пациента
☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента*

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность ☐ Да ☐ Нет

Срок беременности ☐ Недель

День цикла ☐

Менопауза ☐ лет

Время взятия образца*

Диагноз

Дата взятия образца*

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Дополнительные данные о пациенте

Наличие иммунодефицита* ☐ Да ☐ Нет

Результат кожных проб (при наличии)

Реакция Манту
Дата проведения
ДД - ММ - 202Г

☐ Положительная реакция ☐ Сомнительная реакция ☐ Отрицательная реакция ☐ Гиперергическая реакция

Диаскинтест.
Дата проведения
ДД - ММ - 202Г

☐ Положительная реакция ☐ Сомнительная реакция ☐ Отрицательная реакция ☐ Гиперергическая реакция

Вакуумная пробирка с LI-гепарином

Исследование крови
ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

КРОВЬ с ГЕПАРИНОМ

ШТРИХКОД ПРОБЫ

☒ 044402
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB

Тип первичного контейнера	Вакуумная пробирка с Li-гепарином (зеленая крышка)	
Тип контейнера для хранения и транспортировки		
Температура хранения расходных материалов	При t= +17+25 °C	

Подготовка пациента	Условия подготовки определяются лечащим врачом. Специальной подготовки не требуется, допускается употребление негазированной воды.
Правила взятия биоматериала	Взятие крови строго с 09.00. Венепункция, стандартная технология. Пробирка должна заполниться кровью до риски, избыток стабилизатора в пробе может вызвать гемолиз. Если есть данные об иммунодефиците у пациента, необходимо взять дополнительную пробирку.
Подготовка биоматериала к транспортировке	Сразу после взятия крови пробирку плавно перевернуть 8-10 раз для тщательного перемешивания крови с наполнителем. Не встряхивать! Энергичное перемешивание может привести к агрегации тромбоцитов, образованию сгустка и/или недостоверным результатам анализа.
Температура хранения и транспортировки до 24 часов	При комнатной температуре +18+25 °C в первичной пробирке в вертикальном положении. Образец не охлаждать! Пробирку поместить в термос (температура внутри термоса должна составлять +18+25 °C). Транспортировать термос строго в вертикальном положении. Доставить в лабораторию в день взятия крови.