

Инструкция по самостоятельному взятию образцов биологического материала (буккальный соскоб) в домашних условиях

Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение правил взятия, условий хранения или доставки биологического материала может привести к невозможности получения результата исследования.

Подготовка

Воздержитесь от приема пищи и курения в течение полутора часов до взятия биоматериала. Прополосните рот чистой водой.

Взятие образца у младенца проводится через полчаса с момента последнего кормления. Перед взятием дайте малышу попить воды.

Взятие биологического материала:

1. Подпишите конверты-контейнеры для каждого участника в отдельности, указав ФИО и статус предполагаемой родственной связи (например, отец, мать, ребенок).
2. Тщательно вымойте руки с мылом.
3. Аккуратно откройте упаковку с зондами для взятия образцов.
4. Не прикасаясь к вате на палочке, достаньте палочку из полиэтиленовой упаковки. **Всегда держите зонд только за пластиковый стержень. Никогда не касайтесь ватной части для предотвращения загрязнения образцов.**
5. Широко откройте рот, введите зонд в ротовую полость и тщательно потрите ватной палочкой по внутренней стороне щеки примерно 10–20 раз, при этом вращая ее вокруг своей оси, стараясь охватить всю поверхность внутренней стороны щеки. При взятии образца у младенца не прилагайте излишних усилий, чтобы не травмировать слизистую оболочку рта!

6. Поместите зонд в подписанный конверт-контейнер (не кладите зонд в полиэтиленовую упаковку!!!)
7. Повторите пункты 3 – 6 со вторым зондом для другой щеки и опустите его в ТОТ ЖЕ конверт.
8. Оторвите защитную ленту на клапане конверта-контейнера для образцов и заклейте его. Ни в коем случае не используйте слюну для заклейки конверта!
9. Повторите все пункты для другого лица.

Доставку и хранение конвертов-контейнеров следует осуществлять в бумажных пакетах или конвертах в **сухих условиях**, избегая намокания или скапливания конденсата на поверхности конверта-контейнера.

